

Használati utasítás

Könnyű négykerekes járókeret időseknek



Kedves Ügyfél,

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta.

Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Ezzel megelőzheti a termék esetleges károsodását vagy a helytelen kezelésből eredő sérülését. Ha a terméket más személynek adják át használatra, akkor ezt a kézikönyvet a kezébe kell adni.

Használat előtt

Óvatosan vegye ki a csomagot, ne használjon kést vagy más éles tárgyat, hogy elkerülje a csomag tartalmának sérülését.

Ellenőrizze a terméket a sérülések jelei miatt. Ha láthatóan sérült, forduljon a kereskedőhöz a hibaelhárítási eljárással kapcsolatos további információkért.

A Rolator a járás segítésére szolgál. A termék elején található tárolórekesz a kisebb bevásárlások tárolására szolgál. A táskát kifejezetten úgy tervezték, hogy illeszkedjen a görgőhöz. Ne használja/kombinálja más gyártók táskáit vagy kosarait.

Alkatrészlista



- 1) fogantyú
- 2) fékkar
- 3) a fogantyú beállításának fedele
- 4) állítható magasságú fogantyú
- 5) háttámla
- 6) textilülés
- 7) bevásárlótáska
- 8) gomb az első kerék eltávolításához
- 9) első kerék
- 10) hátsó kerék
- 11) fogantyútartó

Használati útmutató



Óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot a termékről, és ellenőrizze a sérülések jeleit.

Nyomja meg a kerék elején lévő piros gombot. Ismétlje meg ezt a lépést a járókerék másik oldalán.

Helyezze be az első kereket az ábrán látható lyukba. Ha a kerék szilárdan rögzítve van, egy kattánást fog hallani.



A hátsó kerék kibontásához: nyomja meg a gombot mindkét oldalon, és húzza felfelé, majd csúsztassa lefelé a hátsó kerékrudat, amíg a gomb vissza nem áll a kiválasztott helyzetbe. Ismétlje meg ugyanezt az eljárást a hátsó kerék másik oldalára.

A hátsó kerekek összecsukása: nyomja meg a gombot mindkét oldalon, és húzza felfelé, majd csúsztassa felfelé a hátsó kerékrudat, amíg a gomb az eredeti helyzetébe nem kerül. Ismétlje meg ezt a műveletet a másik hátsó keréssel.



Csatlakoztassa a fogantyút a fogantyúegység alján lévő reteszelőcsap megnyomásával, és helyezze be a főkeret megfelelő furatába. Ismétlje meg a műveletet a másik oldalon.



Rögzítse a bevásárlótáskát az üléskereten lévő kampóra. A táska könnyen eltávolítható.



Az üléskeret mindkét oldalán történő megnyomásával hajtja ki a rollátort.



A járókeret összecsukásához húzza felfelé az ülésen található fekete fogantyút a képen látható módon.



A megálláshoz ragadja meg és nyomja meg mindkettőt egyszerre, a járókeret hamarosan lelassul, majd megáll.

A rollátor fékjei parkolási lehetőséggel rendelkeznek.

Nyomja meg mindkét féket egyszerre, és érezni fogja, hogy a fék nagyon könnyen kattán. A fékjei most már

reteszelt helyzetben vannak.



A feloldáshoz egyszerűen húzza meg a féket, és a rögzítőfék kattanáskor kioldódik.

A fékrendszer rendszeres beállításra szorul. A korai beállításhoz lazítsa meg a B anyát, majd csavarja/csavarja ki az A anyát. Miután az anya megtörtént húzza meg újra. Ha további beállításra van szükség, lazítsa meg a reteszelőcsavart, és fogóval húzza lefelé a kábelt körülbelül egy milliméterrel. Húzza meg újra a reteszelőcsavart. A fékeket a B anya meglazításával és az A anya fel/lecsavarásával lehet tovább állítani a fent említett módon.

Tisztítás és karbantartás

1. A rollátort csak rendeltetésének megfelelően használja, azaz járássegítő eszközként. csak a szokásos járdákon vagy otthon használható. Nem szabad egyetlen talajon használni, mivel fennáll a veszély vagy a termék károsodásának veszélye.
2. A karbantartáshoz elegendő egy enyhe tisztítószerrel kevert nedves ruhát használni. Soha ne használjon súrolószeres vagy oldószeres tisztítószeret, mert az súlyosan károsíthatja a járókeretet. Erre a kárra a garancia nem terjed ki.
3. Törölje át az összes felületet száraz ruhával, és használjon vízlepergetőszeret, például WD40-et az összes fémrészen.
4. Ellenőrizze, hogy az összes kerék és az összecsukható mechanizmus megfelelően működik-e, és hogy a kerekek szabadon vannak-e. mozognak. Fordítson különös figyelmet az első kerekre, és győződjön meg arról, hogy azok szabadon és akadálytalanul forognak, és hogy biztonságosan rögzítve vannak a vázhoz.
5. Havi rendszerességgel ellenőrizze, hogy minden zár megfelelően rögzítve van-e, nem lazulnak-e meg.
nincs alkatrész. Ezután ellenőrizze a fékek beállítását. Ellenőrizze a fék és a kerék beállítását. 6. Ne csatlakoztasson más cég által gyártott alkatrészeket vagy tartozékokat a járókerethez. Ellenkező esetben nem tudja kihasználni a garanciát, és veszélyeztetheti az egészségét.
7. Ajánlatos a terméket naponta ellenőrizni. Ajánlott azonban a következők elvégzése legalább háromhavonta, ha a járókeretet egynél több felhasználó használja.

Figyelmeztetés!

Ne használja a járókeretet, ha valamelyik kerék nehezen forog, vagy nem rögzül biztonságosan a vázhoz, illetve ha sérülésre vagy egyéb meghibásodásra gyanakszik.

Karbantartás!

Tisztítsa járókeretét nem súrolószerekkel. Csak enyhe tisztítószereket és puha ruhát használjon. A súrolószerek (pl. AJAX) vagy a súroló kendő súlyos károkat

okozhat a termékben, amelyek javítást igényelnek.

Kérjük, ha bármilyen aggálya van, rendszeresen ellenőrizze a terméket.